
		Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Csv—Cerebrospinalvæske; farve(efter centrif.; proc.)			Niveau: Operativt 
Dokumentnummer: O2.25	P-drev (2020): DAT-4325-1	Redaktør: AJ	Dokumentansvarlig: MAB	Version: 1	Godkendt af: AJ 2020-10-27 Ikrafttrædelsesdato: 2020-10-27
Dokumentbrugere: Hæm,Tosoh, Sysmex_ana					

1) Generelle data

IUPAC kode:

NPU21729

Nationalt kortnavn:

Csv- Farve efter centrifugering

Bestillingskode:

NPU21729

Akkrediteret analyse:



Labka II kode:

CSVFARVEC

Synonym:

CSV- HBD, Csv(cellefri)-Hæmogl.deriv.gruppe;Csv

Analysehyppighed:

Hele døgnet

Prioriteter og forventet svartid:

Prioritet:	Svartid:
Akut	< 60 min. fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet	Hurtigst muligt dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine	Samme dag eller uge afhængig af analysehyppigheden

KBA kan kontaktes ved behov for kortere svartid på ugedagsanalyser: 3863 2476

Prøvetagningsrør:

Spidsglas med hvidt skruelåg

Prøvehåndtering:

Bringes til Klinisk Biokemisk Afdeling, inden for en time efter prøvetagningen.

Prøven beskyttes mod lys (brug stanniol) straks efter prøvetagningen.

Rørpost:

Prøven må ikke sendes med rørpost

Analysested:

Klinisk Biokemisk Afdeling, Glostrup. Tlf. 3863 2476

Nødprocedure:

Analysen kan bestilles i tilfælde af nødprocedure via nødblanket

2) Kliniske data

Indikation:

Mistanke om subarachnoidal blødning

3) Analysetekniske data

Holdbarhed af spinalvæske:

Tid	Opbevaringstemperatur
24 timer	i mørke ved 2-8°C og ved 15-25°C
5 dage	efter centrifugering opbevaret i mørke ved 2-8 °C

Minimumsmængde af prøvemateriale:

2 ml spinalvæske

Analyseprincip:

Visuel bedømmelse af cerebrospinalvæskens gulfarvning efter centrifugering. Har spinalvæsken den mindste tone af gulfarvning, er det et unormalt fund.

CE-mærket analyseopsætning:

Nej

Svarafgivelsesinterval:

0 = farveløs

1 = gulfarvning

Analyseinterferens:

Prøver der ikke kan bedømmes på grund af uklarhed, afgives med: "Se Note "Prøven kan ikke bedømmes pga. uklar spinalvæske efter centrifugering".

Prøver der ikke kan bedømmes på grund af rødfarvning (hæmolyseret), afgives med: "Se Note "Prøven kan ikke bedømmes pga. rødfarvning efter centrifugering

Revisioner

Version	Godkendt	Revisions information	Distributionliste
1	2020.10.27	Version 1	Intranet Hjemmeside