




B-Leukocytttype

GENERELT	SP bestillingskode og navn	NPU04100, Leukocytttype;B		
	IUPAC kode og navn	NPU04100, B-Leukocytttype; antalk.(liste)		
	Akkrediteret analyse			
	Labka kode og analysenavn	DIFFMAS, B-Leukocytttype (mask.), gruppe		
	Analysehyppighed	Alle dage - Hele døgnet		
	Prioriteter og forventet svartid	Prioritet:	Svartid:	
		Akut	< 60 min. fra modtagelsen i KBA	
		Fremskyndet	Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA	
		Rutine	Samme dag	
	Nødprocedure	Analysen kan bestilles i tilfælde af nødprocedure via nødblanket		
	Patient/prøveforberedelse	Ingen		
	Nødvendige kliniske oplysninger ved bestilling	Ingen		
	Emballage	 lilla2H – 2 mL glas med lilla prop og hvid ring (K2(K3)EDTA)		
		Alternativ  lilla4S – 4 mL glas med lilla prop og sort ring (K2(K3)EDTA)		
Prøvemængde / prøvemateriale	Glasset skal fyldes helt			
Håndtering af prøvematerialer	Bringes til Klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagningen			
Analysested	Klinisk Biokemisk Afdeling, Glostrup, Tlf.: 38 63 24 76			
KLINISK	Indikation	Mistanke om inflammation eller infektion, samt vurdering af knoglemarvens funktion.		
	Enhed	De enkelte listemedlemmer afgives som x 10 ⁹ /L		
	Svarformat	Nedre grænse	Øvre grænse	Decimaler
		0,0	9,9	1
		10	440	0
	Referenceinterval	Se datablade for de enkelte listemedlemmer		
Mindste kliniske relevante difference	Se datablade for de enkelte listemedlemmer			
Alarm-/ringe-grænse	Ingen			

B-Leukocyttype

	Andre navne	Listemedlemmerne er: B-Basofilocytter B-Eosinofilocytter B-Lymfocytter B-Monocytter B-Neutrofilocytter B-Metamyelo. + Myelo. + Promyelocytter
ANALYSETEKNIK	Analysemetode	Fluorescensfotometri efter farvning af RNA/DNA, samt cellestruktur ved flowcytometri/lysspredning
	Forbehandling af prøve	Ingen
	Holdbarhed af prøvemateriale	K2EDTA blod er stabilt ved rum temperatur i 10 timer og på køl i 10 timer
	Minimumsmængde af prøvemateriale	Min. 1 mL blod
	Apparat	Sysmex XN 9000
	CE-mærket analyseopsætning	Ja
	Kvalitetssikring	Intern: Symex XN-Check Ekstern: 3041 DK Hæmatologi, DEKS 10/årligt
	Sporbarhed på kalibrator	Der anvendes ingen kalibrator
	Svarafgivelsesinterval	Se datablade for de enkelte listemedlemmer
	Måleområde	Se datablade for de enkelte listemedlemmer
	Beregninger	Ingen
	Måleusikkerhed	Se datablade for de enkelte listemedlemmer
	Interferens / fejlkilder	Ingen kendte
	Bemærkninger	Ved rekvirering af B-Leukocyttype, vil B-Leukocytter også blive rekvireret. Hvis prøven indeholder abnorme celler udføres B—Leukocyttype(mikr.)gruppe. Denne analyse udføres på hverdage i dagtiden. Hvis B-Leukocytter; antalk. er $\leq 0,5 \times 10^9/L$ udføres B—Leukocyttype(mikr.)gruppe ikke.
Referencer	Sysmex Product Fact Sheet, CBC+DIFF, s. 1 Øvrige kan oplyses ved henvendelse	

Dette datablad erstatter eventuelt tidligere fremsendt datablad for analysen. Databladet forældes ved printning, da det opdateres elektronisk.

Niklas Rye Jørgensen
Afsnitsansvarlig overlæge

Helle Lethmar
Ledende bioanalytiker