


Atmos LC 27 sugemaskine

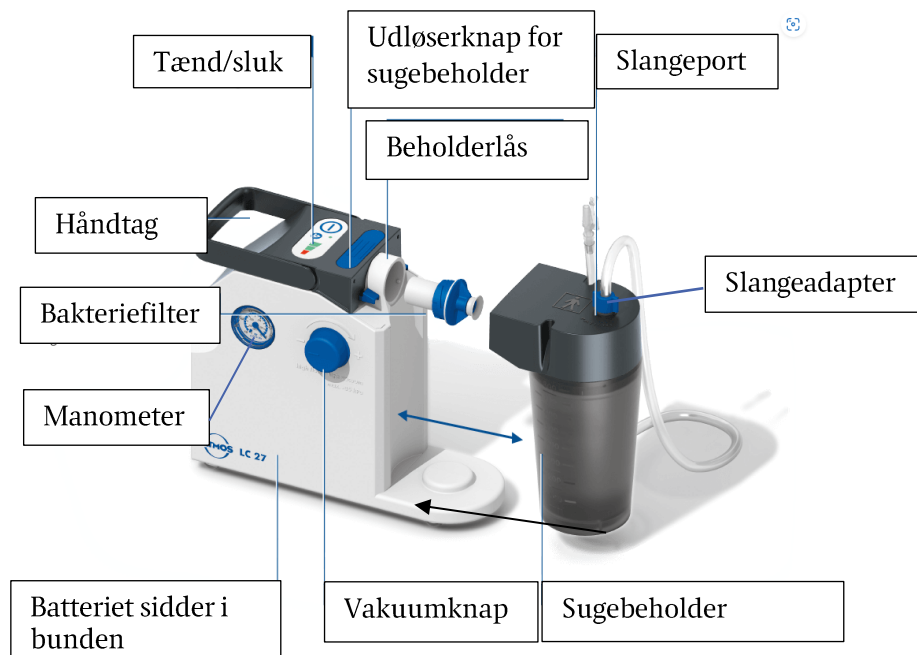

Atmos LC 27 er et transportsug, der opbevares i en taske. Sugemaskinen anvendes, når brugeren ikke er i nærheden af den stationære sugemaskine. Når sugemaskinen ikke anvendes, skal den være sat til opladning, så den altid er klar i tilfælde af en akut situation.

Sugeevnen kontrolleres ved at holde for sugestudsens, derefter tænde for maskinen. Manometeret skal stige til 60 kPa.


Sugemaskinen er udstyret med en sugebeholder, som kan rumme ca. 800ml væske. Beholderen tømmes, når den er ca. halvt fyldt for at sikre optimal sugeevne og undgå fugt i motoren.

Mellem sugebeholderen og maskinen sidder et bakteriefilter, som sikrer at maskinen ikke bliver forurenet. Uden filteret kan maskinen ikke skabe vakuum.



Batteri

Atmos LC 27 sugemaskine har et internt batteri med en holdbarhed, der svarer til ca. 60 minutters sugning. En lille grøn LED lampe lyser, når maskinen er tændt. Batterikapaciteten kan aflæses på maskinen.

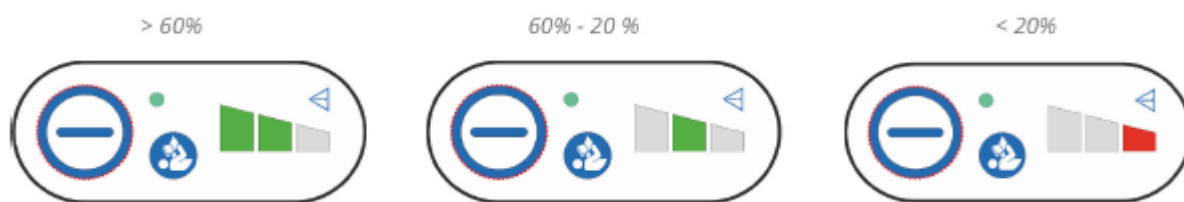

Når der er under 20 % batterikapacitet og LED lampen lyser rødt skal sugemaskinen straks tilkobles lysnettet, og den vil automatisk genoplade.

Det genopladelige batteri aflader med tiden. Af hensyn til batteriets levetid og dermed sugemaskinens funktion, aflades maskinens batteri hver 3. måned og oplades igen, det kan tage op til 12 timer.

- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Tænd for maskinen og lad den køre indtil den standser helt.
- Når lysindikatoren slukker, er batteriet afladt.
- Sluk og tænd derefter igen for at sikre at batteriet er helt afladt.
- Sæt stikket i stikkontakten. Begge grønne LED lamper vil lyse under opladning.
- Når lysindikatoren holder op med at lyse, er batteriet opladt 100%.

Hvis advarselslampen blinker hurtigt, skal batteriet udskiftes. Ekstrem varme eller klude kan påvirke batterikapaciteten. Kontakt RCØ Ambulatorium for nærmere information.

Rengøring og vedligeholdelse

Udfør håndhygiejne og tag handsker på, før du håndterer sugebeholderen.

Sugemaskinens aftagelige dele rengøres i en opvaskebalje, som ikke bruges til andet. RCØ anbefaler, at balje og børste skoldes efter brug.

Daglig rengøring

- Skyllekanden skal rengøres dagligt og vaskes i uparfumeret opvaskemiddel og varmt vand. Efterfølgende skal skyllekanden skylles under rindende vand og nyt skyllevand påfyldes.
- Hvis sugeslange og sugestuds har været anvendt, skal det udskiftes og kasseres.
- Hvis sugebeholderen har været anvendt, skal den skilles ad og vaskes sammen med slangeadapteren i uparfumeret opvaskemiddel og varmt vand, skylles og lægges til tørre.
- Saml suget og tjek om det fungerer.

Månedlig rengøring

- Filter skiftes hver 2. måned.
- Slange adapter skiftes hver 4. måned.

Hvis transportsuget ikke har været i brug, skiftes sugeslanger og sugestuds en gang om måneden.

RCØ anbefaler, at sugeslangen har en længde på ca. 1,5 m. Vær opmærksom på at sugeevnen nedsættes, hvis sugeslangen er for lang.

Fejlfinding

Start fejlfindingen på Atmos LC 27 sugemaskine med at tage sugebeholderen Hvis den sorte membran ikke bevæger sig, er der noget galt med sugemaskinen, og RCØ skal kontaktes. Nedbruddet skal noteres i logbogen.

Intet eller kun lidt vakuum på sugemaskinen kan være tegn på eventuel utæthed eller blokering i systemet. Hver del kontrolleres og sættes på maskinen, derefter kontrolleres vakuum ved at sætte en finger på udgangen.

- Kontrollér at vakumknappen står på den ønskede styrke.
- Kontrollér om bakteriefilteret er tørt, intakt og sidder korrekt.
- Kontrollér at sugemaskinen er tilsluttet lysnettet.
- Kontroller at batteriet er opladt.

Referencer

Produktinformation. ATMOS medizing Technik GmbH & Co KG. Germany

Billeder: Producenten.